


Urostomie Soins à domicile



Stomie
Peau
Âme

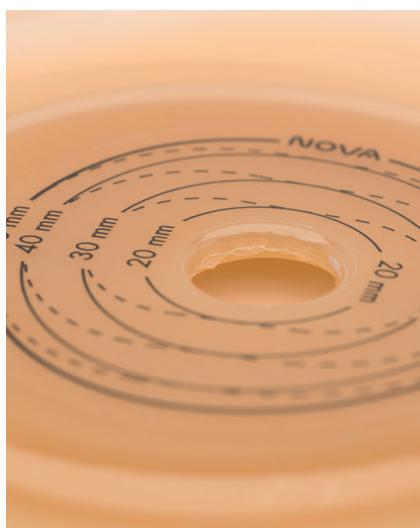

Les produits Dansac sont conçus pour une utilisation facile et pour aider à maintenir une peau naturellement saine. Préserver la santé de la peau péristomiale peut vous aider à vous sentir plus à l'aise et plus confiant/e dans tout ce que vous faites.

Conseils pour la santé de la peau

La zone autour de la stomie, sur laquelle vous placez votre protecteur cutané, est appelée zone péristomiale. Il est important de veiller à ce que cette zone soit sèche et protégée des effluents de la stomie. La stomie est rouge et humide; elle ne possède pas de nerfs et n'est donc pas douloureuse lorsqu'on la touche.

Vous aurez besoin de ce qui suit:

- un sac poubelle
- des lingettes sèches pour le nettoyage/séchage
- de l'eau tiède pour le nettoyage
- une nouvelle poche et/ou un nouveau protecteur cutané
- une paire de ciseaux pour découper le protecteur cutané (si nécessaire)
- tout accessoire que vous utilisez éventuellement.



Détachez délicatement votre appareillage. Éponger la peau avec une lingette sèche. Il est possible de voir un peu de sang sur votre lingette lorsque vous nettoyez la zone autour de la stomie. Cela s'arrête généralement tout seul.



Humidifiez quelques lingettes dans de l'eau tiède. Nettoyez soigneusement autour de votre stomie. Assurez-vous que la peau péristomiale soit totalement sèche avant de remplacer un nouveau protecteur cutané et/ou une nouvelle poche.

Changer une poche 1 pièce



Vérifiez que l'ouverture du protecteur cutané correspond à la taille de la stomie. Vous pouvez utiliser un gabarit de stomie pour cela.



Si nécessaire, ajustez l'ouverture du protecteur cutané en la coupant à la taille voulue. Veillez à ce que l'ouverture soit exactement de la bonne taille, pour éviter d'irriter la peau.



Pour appliquer la nouvelle poche, retirez le film protecteur du protecteur cutané directement avant l'application.



Si nécessaire, pliez légèrement le haut de la poche vers l'extérieur. Commencez par l'appliquer sur le dessous, puis tout autour et enfin sur le dessus de la stomie.



Frottez doucement le protecteur cutané autour de la stomie.



Avec vos doigts, appuyez légèrement sur le protecteur cutané du centre vers les bords afin de vous assurer qu'il est bien fixé en place.



Vérifiez si le robinet de votre poche est bien sur la position «fermé». Le robinet est fermé si vous ne pouvez pas voir la goutte d'or.



Lavez-vous les mains après le changement de la poche.

Pour de plus amples informations sur nos poches ou des échantillons, veuillez consulter www.dansac.be

Changer une poche 2 pièces




Vérifiez que l'ouverture du protecteur cutané correspond à la taille de la stomie. Vous pouvez utiliser un gabarit de stomie pour cela.



Si nécessaire, ajustez l'ouverture du protecteur cutané en la coupant à la taille voulue. Veillez à ce que l'ouverture soit exactement de la bonne taille, pour éviter d'irriter la peau.



Pour appliquer la nouvelle poche, retirez le film protecteur du protecteur cutané directement avant l'application.

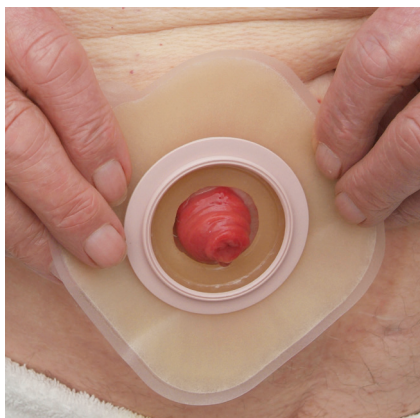

Positionnez le protecteur cutané sur votre stomie. Avec vos doigts, appuyez légèrement sur le protecteur cutané, du centre vers le bord, afin de vous assurer qu'il est bien ajusté et sécurisé.



Fixez la poche dans le protecteur cutané. Utilisez vos doigts et appuyez sur tout le pourtour afin de contrôler la bonne fixation de la poche sur le protecteur cutané.



Revérifiez si la poche est bien connectée au protecteur cutané en tirant doucement sur la poche.



Vérifiez si le robinet de votre poche est bien sur la position «fermé». Le robinet est fermé si vous ne pouvez pas voir la goutte d'or.



La poche est bien mise en place.



Lavez-vous les mains après le changement de la poche.



Conseils pour les soins quotidiens de la stomie



Stomie
Peau
Âme

Mesurez régulièrement votre stomie

Votre stomie peut être gonflée immédiatement après la chirurgie ainsi que pendant les semaines qui suivent. Le gonflement diminuera progressivement, c'est pourquoi il est important de mesurer fréquemment la taille de votre stomie. Un guide de mesure est joint à chaque boîte de poches. Une bonne pratique est de mesurer régulièrement votre stomie au cours des 6 premières semaines. Contactez votre stomathérapeute si vous avez besoin d'aide.

Santé de la peau

La santé de la peau autour de la stomie (peau péristomiale) est importante. Si la peau péristomiale devient inconfortable, démange, rougit ou devient douloureuse, ceci peut indiquer un suintement des effluents de la stomie sur la peau. Vous devrez peut-être contacter votre stomathérapeute si le problème persiste.



Être à l'aise dans sa peau

Dansac

Hollister France Inc. Belgian Branch

Avenue Einstein 8

1300 Wavre

☎ 0800 90 626

www.dansac.be

MISES EN GARDE

La réutilisation d'un produit à usage unique peut entraîner un risque potentiel pour l'utilisateur, notamment une mauvaise adhérence. Le retraitement, le nettoyage, la désinfection et la stérilisation peuvent endommager le produit. Cela peut entraîner des odeurs ou une fuite. Assurez-vous que le produit est bien ajusté comme indiqué. Si la découpe du protecteur est incorrecte ou en cas de fuite, des lésions cutanées peuvent survenir (p.ex., irritation, éraflure, éruption cutanée ou rougeur). Cela peut réduire le temps de port.

Remarques:

Pour garantir une bonne adhérence, appliquez sur une peau intacte, propre et sèche. N'utilisez pas d'huiles ou de lotions. Ces produits peuvent interférer avec l'adhérence du protecteur cutané. L'ajustement du produit est affecté par de nombreux facteurs tels que la conception de la stomie, les substances éliminées par la stomie, l'état de la peau et les contours abdominaux. Contactez un(e) infirmier(ère) stomathérapeute ou un professionnel de santé pour obtenir des conseils sur le système de poche pour stomie ou les irritations cutanées. En cas de blessure grave (incident) liée à votre utilisation du produit, contactez votre distributeur ou fabricant local, ainsi que votre autorité compétente locale. Pour davantage d'informations, rendez-vous sur www.dansac.com/ authority ou contactez le distributeur local.

Les informations contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'information générale et ne sont pas destinées à servir de conseil médical. Veuillez consulter notre site web pour les informations les plus récentes, car les directives peuvent parfois changer. Suivez toujours le mode d'emploi du produit et contactez votre professionnel de la santé pour de plus amples informations.

CE Avant utilisation, veuillez lire le mode d'emploi pour prendre connaissance des informations concernant l'usage prévu, les contre-indications, les avertissements, les précautions et autres instructions.

Le logo Dansac est une marque déposée de Dansac A/S.
© Janvier 2022 Dansac A/S
BE-OST21F55

dansac