





**Dansac produits complémentaires**  
Votre partenaire santé de la peau


# La formule tampon pH unique de l'anneau Dansac TRE a été conçue pour contribuer au maintien d'une peau naturellement saine

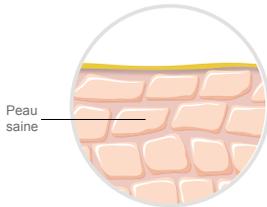

- La peau saine est légèrement acide (pH 4.0-6.0).
- = Manteau acide<sup>1</sup>: agit en tant que barrière face aux toxines et bactéries.

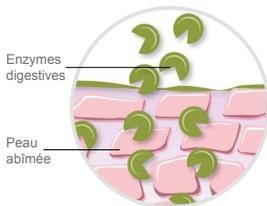

- Les enzymes digestives sont actives à pH proche du neutre.
- Ces enzymes peuvent altérer le pH de la peau et décomposer les cellules cutanées.
- Résultat = dermatite de contact irritative<sup>2</sup>

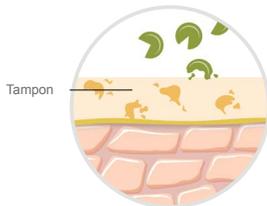

- La technologie TRE a été conçue pour aider à maintenir le pH naturel de la peau saine.
- Respectueux de la peau, hostile pour les enzymes digestives.

Dimensions	Référence	Boîte	CNK	INAMI
⊖ 18mm	<b>072-48</b>	10	3750 247	641071 - 904025000785

⊖ 48mm

↑ 2,3mm

⚖ 4g



- ✓ 3 niveaux de protection
- ✓ Facile à ajuster
- ✓ Peut être appliqué sur la peau ou le support
- ✓ Sans alcool
- ✓ Packaging pratique à stocker

<sup>1</sup> Yosipovitch, G. Maibach, H.I, 1996 'Skin Surface pH: a protective acid mantle'.  
Cosmetics & Toiletries magazine, Vol. 111, no. 12, p. 101

<sup>2</sup> Williams, J.D.L. Lyon, C.C. 2010. Dermatitis: Contact Irritation and Contact Allergy. In: Lyon, C.C. Smith, A. Abdominal stomas and their skin disorders. 2nd Edition. London: Informa UK, pp52-104

# L'anneau Dansac TRE

3 niveaux de protection cutanée:



## Tampon pH

Conçu pour aider à gérer les effets nocifs des enzymes digestives sur la peau.



## Absorption

Aide à absorber l'excès d'humidité pour maintenir le pH naturel de la peau sans perdre ses propriétés.



## Adhésion

Conçu pour que l'anneau soit souple et sûr, et pour qu'il aide à protéger la peau des effluents, tout en étant facile à enlever.





## Dansac Soft Paste

Comble les plis et cicatrices

Volume	Référence	Boîte	CNK	INAMI
50g	<b>77550-0</b>	1	2770 014	641071 - 904025000076
14,2g	<b>77514-2</b>	1	3750 262	641071 - 904025000076



## Dansac Ceinture

Aide à assurer le maintien de l'appareillage

Longueur	Référence	Boîte	CNK	INAMI
100cm (M)	<b>09000-0000</b>	1	2770 022	641012 - 904024000056
150cm (L)	<b>090-01</b>	1	2770 030	641012 - 904024000056



## Dansac Skin Lotion

Nettoie la peau péristomiale (sans eau)

Type	Référence	Boîte	CNK	INAMI
Lingettes	<b>71000-0000</b>	50	1509 017	Produit non-remboursé



## Dansac Nodor S désodorisant (gouttes)

Aide à prévenir les odeurs; pour la discrétion

Volume	Référence	Boîte	CNK	INAMI
50ml	<b>080-00</b>	1	1508 977	Produit non-remboursé

**Dansac Belgium**

Chaussée des Collines 52 - 1300 Wavre  
010 23 04 78 - dansaccontact@dansac.com

[www.dansac.be](http://www.dansac.be)

Pour les mises en garde, précautions, contre-indications, instructions et une utilisation conforme, lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Ce document est destiné à l'usage des professionnels de santé.  
Dansac et son logo, Dansac, TRE et Nodor S sont des marques déposées de Dansac A/S.  
©2018 Dansac A/S - OST18F40

**dansac** 