


Colostoma

De verzorging thuis



Dansac producten zijn ontworpen om de huid rondom uw stoma gezond te houden en zijn eenvoudig in gebruik. Een gezonde huid draagt bij aan een comfortabel en zeker gevoel

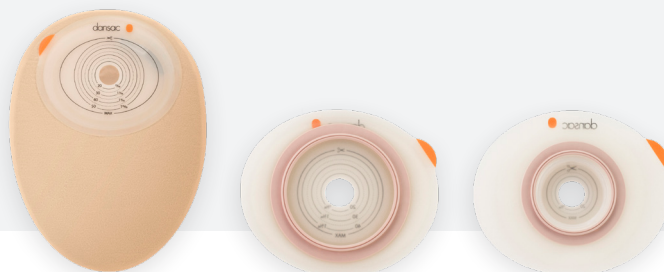

Houd de huid gezond

Het gebied rondom uw stoma wordt de peristomale huid genoemd. Het is van groot belang dat deze gezond blijft en beschermd wordt tegen stoma-output. Houd daarom uw huid goed schoon. Het slijmvlies van de stoma is roze-rood en vochtig. De stoma zelf heeft geen zenuwuiteinden en is gevoelloos.

U heeft nodig:

- Een afvalzakje
- Doekjes voor het reinigen/afdrogen
- Lauw water
- Een nieuw zakje en/of huidbeschermer
- Een schaar (als de huidbeschermer nog op maat geknipt dient te worden)
- Extra hulpmiddelen (mocht u deze gebruiken)



Maak voorzichtig het materiaal los. Dep de huid droog met een schoon doekje. Het kan voorkomen dat u soms wat bloed op het doekje ziet. Meestal stopt dit vanzelf.



Bevochtig enkele doekjes met lauw water. Reinig uw stoma voorzichtig. Let erop dat de huid rondom de stoma goed droog is voordat u het nieuwe opvangsysteem aanbrengt.

Een 1-delig opvangsysteem vervangen



Controleer of de opening in de huidbeschermers overeenkomt met de grootte van de stoma. Hiervoor kunt u een meetkaartje gebruiken.



Indien nodig past u de opening in de huidbeschermers aan door deze op maat te knippen.



Zorg ervoor dat de opening precies op maat is, dit om te voorkomen dat de huid gaat irriteren.



Maak voorzichtig het bestaande opvangsysteem op de buik aan de bovenkant los.



Het kan handig zijn om een paar doekjes te gebruiken om de randen van de huidbeschermers te bevochtigen.



Terwijl u met één hand de buik ondersteunt, verwijdert u met de andere hand het opvangsysteem. Verwijder het materiaal voorzichtig pellend van boven naar beneden. Reinig daarna uw huid met een vochtig doekje.



Verwijder de afdekfolie van de huidbeschermers van het nieuwe opvangsysteem.



Klap de bovenkant van het zakje voor de helft naar buiten toe om. Breng het opvangsysteem eerst aan de onderkant aan, vervolgens rond de stoma en daarna de bovenkant.



Controleer of het opvangsysteem goed bevestigd is door met uw vingers vanaf het centrum van de huidbeschermers naar de randen toe te wrijven. Was uw handen als u klaar bent met het vervangen van uw opvangsysteem.

Een 2-delig opvangsysteem vervangen



Controleer of de opening in de huidbeschermers overeenkomt met de grootte van de stoma. Hiervoor kunt u een meetkaartje gebruiken.



Indien nodig past u de opening in de huidbeschermers aan door deze op maat te knippen. Zorg ervoor dat de opening precies op maat is, dit om te voorkomen dat de huid gaat irriteren.



Terwijl u met één hand de buik ondersteunt, verwijdert u met de andere hand de huidbeschermers. Reinig uw stoma voorzichtig. Het kan voorkomen dat u soms wat bloed op het doekje ziet. Meestal stopt dit vanzelf.



Verwijder de afdekfolie van de nieuwe huidbeschermers pas vlak voor het aanbrengen.



Plaats de opening van de huidbeschermers over de stoma en druk de huidbeschermers goed tegen de buik aan. Wrijf met uw vingers vanaf het centrum van de huidbeschermers naar de randen toe. Vooral het gedeelte rondom de stoma extra aandrukken.



Bevestig het opvangzakje op de ring. Voel met uw vingers rondom de zwevende ring of het opvangzakje goed bevestigd is.



Controleer of het zakje goed bevestigd is door eraan te trekken.



Was uw handen als u klaar bent met het vervangen van uw opvangsysteem.

Wilt u meer informatie
of een proefpakket
aanvragen van onze
opvangsystemen?
Bezoek onze website
www.dansac.be

dansac



Tips voor dagelijkse verzorging



Stoma
Skin
Soul

Meet regelmatig de diameter van uw stoma

De eerste weken na de operatie kan de stoma wat gezwollen zijn. Omdat deze zwelling geleidelijk afneemt is het vooral in deze periode van belang dat u regelmatig de diameter van uw stoma opmeet. In bijna iedere doos stoma opvangsystemen vindt u een meetkaartje ("Dansac Stoma Guide") waarmee u gemakkelijk de juiste maat kunt bepalen. Indien nodig kunt u de opening van de huidbeschermer aanpassen met een schaar. **Let op:** Indien nodig kunt u de opening van de huidbeschermer aanpassen met een schaar.

Als u daarbij hulp nodig heeft kunt u contact opnemen met uw stomaverpleegkundige.

Wees zuinig op de huid rondom de stoma

Het is belangrijk dat de huid rond uw stoma gezond blijft. Als de huid rond de stoma oncomfortabel, jeukend, rood of pijnlijk wordt, kan dit erop wijzen dat de output van de stoma op de huid lekt. Als dit probleem aanhoudt, raden wij u aan om contact op te nemen met uw stomaverpleegkundige.



Voel je goed in je vel

Dansac

Hollister France Inc. Belgian Branch

Avenue Einstein 8

1300 Wavre

☎ 0800 90 626

www.dansac.be

WAARSCHUWINGEN

Hergebruik van een product voor eenmalig gebruik kan een potentieel risico voor de gebruiker opleveren, zoals een slechte hechting. Herverwerking, reiniging, desinfectie en sterilisatie kunnen het product in gevaar brengen. Dit kan resulteren in geur of lekkage. Zorg voor een goede pasvorm volgens de instructies. Als de opening van de barrière niet correct is of als er lekkage optreedt, kan huidbeschadiging optreden (bijv. Irritatie, beschadigde huid, uitslag of roodheid). Dit kan de draagtijd verkorten.

Opmerkingen:

Voor een goede hechting aanbrengen op een schone, droge, intacte huid. Gebruik geen oliën of lotions. Deze producten kunnen de hechting verstoren. De pasvorm van het product wordt beïnvloed door vele factoren, zoals de constructie van de stoma, de output van de stoma, de conditie van de huid en de buikcontouren. Neem contact op met een stomaverpleegkundige of zorgverlener voor hulp bij het stomazakstelsel of bij huidirritatie. In het geval van een ernstig letsel (incident) in verband met uw gebruik van het product, neem dan contact op met uw plaatselijke distributeur of fabrikant en uw plaatselijke bevoegde autoriteit. Zie www.dansac.com/authority of lokale distributeur voor meer informatie.

De informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en is niet bedoeld als medisch advies. Zie onze website voor de meest actuele informatie, aangezien richtlijnen soms kunnen en zullen veranderen. Volg altijd de gebruiksaanwijzing van het product en vraag uw zorgverlener om meer informatie.

CE Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing voor informatie over de beoogde toepassing, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies.

Het Dansac-logo is een handelsmerk van Dansac A/S.

© Januari 2022 Dansac A/S

BE-OST21N53

dansac